

คู่มือการใช้งาน
หุ่นจำลองเด็กทารกฝึกแก้ภาวะหายใจอุดกั้น
INFANT CHOKING MANIKIN
(100-1640U)



การใช้งาน

- วางหุ่นลงบนที่ราบ
- บริเวณคอหุ่นจะมีเชือกแขวนขึ้นส่วน สำหรับสร้างภาวะหายใจอุดกั้น มีลักษณะเป็นเม็ดพลาสติกแข็ง ทรงกลมสีขาว
- นำชิ้นส่วนพลาสติกใส่เข้าไปในปากหุ่น
- ใช้นิ้วกดเม็ดพลาสติกในปากหุ่นให้จมเข้าไปยังตำแหน่งส่วนลึกสุดของระบบทางเดินหายใจ
- ทำการช่วยเหลือด้วยวิธี obstructed airway maneuver
- การช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะทำให้ชิ้นส่วนอุดกั้นกระเด็นออกจากปาก

ข้อควรระวัง

- ห้ามนำหุ่นไปฝึกการช่วยเหลือด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
- ห้ามใส่น้ำลงในปากเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหุ่นเด็ดขาด
- ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดสัปดาห์หลังการใช้งาน แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งก่อนเก็บหุ่นในกระเป๋า
- ระวังการบวมขึ้น ทั้งจากปากกาหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ เพราะถ้าเลอะแล้ว จะไม่สามารถเช็ดออกได้